

Platinum fit check

Wit silicone materiaal voor het opsporen van drukplaatsen

Toepassingen

Platinum fit check is het meest geschikte materiaal voor het opsporen van afwijkingen in de pasvorm van prothesen. Handelingen kunnen snel, gemakkelijk en netjes worden uitgevoerd. Voor het controleren van de pasvorm van:

- **Kronen** :randen proximale en oclusale vlakken
- **Gegoten kappen** :pasvorm kap
- **Inlays** :randen, proximale vlakken
- **Prothesen** :mucosale vlakken

Contra Indicaties

Patienten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor siliconenaafdrukmaterialen Verwijs de patient naar een arts indien er een allergische reactie optreedt.

Gebruiksaanwijzing

- 1) **Mengen** : Plaats het patroon in de mixmachine. De beschermingsdop kan worden verwijderd door deze te draaien. Gebruik de dop niet meer opnieuw!
- 2) **Uitharden** : Verspreid het mengsel over de voorziening en plaats deze in de mond. Laat de patient langzaam tot de centrale positie dicht bijten en houdt deze positie gedurende 3 min.
- 3) **Beoordelen** : Neem de voorziening uit met een geschikt instrument. De plaatsen die van een uniforme laag(30-120 µm) zijn voorzien, bezitten de goede pasvorm. De plaatsen met een zeer dunne of dikke laag, moeten gecorrigeerd worden volgens een gebruikelijke techniek.
- 4) **verwijderen en schoonmaken** : Na de beoordeling wordt het materiaal verwijderd en wordt de voorziening schoongemaakt.

Opmerkingen:

Gooi de eerste 3 cm van het afdruk materiaal uit de nieuw gevulde patronen weg.
Bewaar gebruikte patronen met de Mengtip. Deze kan dienen als dop.
Vermeng niet met componenten van enig ander silicone afdruk materiaal

Desinfectie

Afdrukken kunnen worden gedesinfecteerd met standaard desinfectievloeistoffen

Bewaren

Bewaar het product niet boven de 25 °C (78 °F).

Extra opmerkingen:

Gebruik geen standaard (condensatie typen) siliconen afdruk materiaal.
Latex handschoenen kunnen de uithardingstijd beïnvloeden.

