

## Platinum implanto 80 ( AUTOMIX, regular set)

Spuitbaar afdruk materiaal voor implantaten in een edente kaak

Platinum implanto 80 is een speciaal ontwikkelt automix afdruk materiaal voor de implantologie met een zeer hoge shore A hardheid met een stugge viscositeit op basis van additie vinyl siliconen.

Platinum implanto 80 heeft zeer hydrofiele eigenschappen en is bruikbaar op vochtige oppervlaktes.

Het voldoet aan de ISO 4823,(2000) type 1( heavy body)

### Prepareren van het mengpistool

Verwijder het dopje van de cartridge en gooi deze weg. Deze wordt niet meer gebruikt. Plaats hiervoor een mengtip op de cartridge en plaats deze in het mengpistool. Spuit een hoeveelheid ter grote van een erwt voor het gebruik eruit om de vermenging goed op gang te brengen.

Laat de mengtip tot het volgende gebruik op de cartridge.

### Het nemen van een afdruk

Het materiaal kan zowel voor de directe als voor de indirecte afdruk methode gebruikt worden.

De verwerkingstijd is 2 minuten en het uitharden in de mond duurt ca 3 minuten.

### Uitgieten

De afdruk kan 30 minuten na het uit de mond nemen uitgegoten worden. Verdere restricties zijn er niet.

### Galvaniseren

De afdrukken kunnen met koper en zilver gegalvaniseerd worden.

### Desinfecteren

Afdrukken kunnen worden gedesinfecteerd met standaard desinfecteermiddelen.

### Bewaaradvies

Het produkt mag niet boven de 25 °C bewaard worden.

### Opmerkingen

Niet gebruiken samen met standaard(condensatie typen) siliconen afdruk materiaal.

Gebruik geen Latex handschoenen, deze kunnen de uitharding verstoren.

