

Platinum orange print

Alginaat

Gebruik

Voor de hoeveelheid water en alginaat gebruik bijgeleverde lepel.

Mixing time: 35 sec

Working time 1min20sec

Setting time 1min30sec

Kenmerken:

Smaak; sinaasappel fruit

Dust free

Lood en cadmium vrij

Kleur; oranje

Handige maatlepel

Goede consistentie

Opmerkingen:

Deze afdruk is tot 6 dagen na afdrukken uit te gieten, mits goed bewaard

Bewaren

Bewaar het product niet boven de 25 °C (78 °F).

