

Aanbevelingen voor gebruik

PLATINUM siliconen adhesief

Om verzekerd te zijn van voldoende kleefkracht tussen het afdrukmetaal en de afdruk lepel en om ongecontroleerde deformatie tegen te gaan tijdens het maken van de afdruk wordt PLATINUM siliconen adhesief aangeraden.

Eigenschappen

PLATINUM siliconen adhesief zorgt voor een goede adhesie tussen de extra uithardende of condensatie uithardende siliconen en de individuele lepelplaten.

Gebruiksaanwijzing

Doe een dunne laag PLATINUM siliconen adhesief op de afdruk lepel met behulp van het kwastje en laat het tenminste **3 minuten** drogen. Vervolgens kan de afdruk lepel worden gebruikt voor het maken van de afdruk.

Waarschuwing

PLATINUM siliconen adhesief mag alleen worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte. Na huidcontact grondig afspoelen met water.

Product

Flesje van 10 ml PLATINUM siliconen adhesief.

Bewaren

Bewaar materiaal niet boven de 25 °C (78 °F). Gebruik het niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

